

EVO
EVOLUZIONE
2022

L'EVOLUZIONE
DIVENTA
RIVOLUZIONE



IMPAREGGIABILE PER ...

- ☑ La traslucenza e il valore simili a quelli del dente naturale.
- ☑ La fedeltà cromatica, dal colletto allo smalto.
- ☑ L'estetica finale, la stabilità e la durata nel tempo.
- ☑ Garantita e certificata 100% Made in Italy.

La linea Evo 2022 è realizzata con polveri altamente reattive di ultimissima generazione che permettono ai nostri materiali di trasmettere traslucenza, cromia e valore simili a quelli del dente naturale.

Il giusto cromia e valore, anche nella parte dello smalto, sono stati ottenuti impiegando i coloranti e gli aggreganti più evoluti e performanti presenti oggi sul mercato.

Per ottenere questi risultati le materie prime utilizzate sono state trattate e finalizzate artigianalmente in Italia.

Solo per la linea MICHELANGELO

**Questo prodotto può essere sinterizzato
anche in soli 70 minuti ***

**Solo per corone singole*

Istruzioni per cottura veloce in 70 minuti

Cottura: da temperatura ambiente a 1400 gradi incrementare di 35/40 gradi al minuto, arrivati a temperatura (1400) stazionare per 2 minuti, da 1400 a 1560 incrementare di 8 gradi al minuto e mantenere per 20 minuti (1560).

Raffreddamento: 35 gradi al minuto fino a 700 gradi poi inerzia termica fino a 200 gradi, raggiunta questa temperatura si può aprire parzialmente il forno.

Utilizzato e consigliato da
Alessandro Arnone per la sua tecnica (I.E.S.) Inside Enamel Skin.



ZIRKONART

Il Rinascimento della Zirconia Italiana